

CELIACHIA

Test per la determinazione degli anticorpi IgA associati alla celiachia

ISTRUZIONI

Sacchetto bianco isolante contenente:

n.1 stick reattivo

n.1 pipetta

In altro sacchetto:

n.1 lancetta pungidito monouso

n.1 provetta bianca contenente un liquido

n.1 provetta contenente un capillare in vetro

n.1 istruzioni in italiano

- Se le istruzioni all'uso non vengono seguite fedelmente, il risultato potrebbe risultare falso. Non riutilizzare le componenti usate.
- La diagnosi finale è di competenza del medico, sulla base di sintomi clinici e di eventuali ulteriori analisi di laboratorio.
- Non utilizzare il test dopo la data di scadenza
- Non usare il test se il sacchetto bianco isolante è aperto o danneggiato
- Il test deve essere effettuato entro 10 minuti dall'apertura del sacchetto bianco isolante
- Il test deve essere utilizzato esclusivamente per la determinazione degli anticorpi IgA associati alla celiachia
- Non mischiare i reagenti di differenti lotti di provette
- Il liquido contenuto nella provetta contiene lo 0,09% di sodio azide. Evitare il contatto con la pelle. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Pazienti con carenza selettiva di IgA non possono essere sottoposti a questo test.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Smaltire il materiale di scarto nella raccolta differenziata
- Conservare il kit a temperatura ambiente da +10°C a 27°C. Non riporre nel freezer.
- Scadenza. Il kit ha una durata di 18 mesi. La scadenza viene indicata sul sacchetto bianco isolante con il formato 2008-12 (dicembre 2008).

Avvertenze prima dell'utilizzo

- Leggere con attenzione le istruzioni per una corretta procedura del test. Tenere alla portata di mano un orologio. Eseguire il test in un luogo ben illuminato.
- I componenti del Kit devono essere utilizzati a temperatura ambiente.
- Prima di iniziare il test preparate tutte le componenti pronte all'uso, appoggiando lo stick reattivo su una superficie piana ed orizzontale ed asciutta. Quando il sacchetto protettivo bianco è stato aperto, il test DEVE ESSERE ESEGUITO IN 10 MINUTI. Uso riservato esclusivamente ai medici.

Istruzioni d'uso

- 1) Pre caricare la molla della lancetta pungidito spingendo verso il basso il peduncolo di colore arancione, fino a sentire uno scatto. Girare fino al distacco del peduncolo dalla lancetta pungidito.




- 2) Scaldare la mano scelta per il prelievo con acqua calda o massaggiandola delicatamente. Scegliere un dito e continuare il massaggio per far affluire sangue.
- 3) Disinfettare il polpastrello del prelievo con la salviettina disinfettante.
- 4) Appoggiare la lancetta sterile pungidito dalla parte del peduncolo distaccato, in corrispondenza del foro grande di forma rotonda. Attivarla premendo il pulsante come da figura. La puntura è praticamente indolore.




- 5) Far fuoriuscire una goccia di sangue e prendere con attenzione il capillare in vetro contenuto nella provetta di colore azzurro. Tenendolo orizzontale al dito avvicinate lo alla goccia di sangue in modo da riempirlo completamente.



- 6) Inserire il capillare di vetro riempito completamente di sangue nella provetta trasparente contenente il liquido, chiudendo il tappo in modo ermetico. Scuotete la provetta finché il sangue contenuto nel capillare si è mischiato completamente con il liquido.

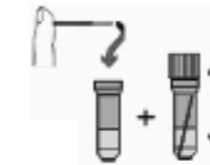

- 7) Utilizzando la pipetta, prelevate il liquido dalla provetta. Tenendo la pipetta verticale allo stick reattivo fate scendere tre gocce di liquido in corrispondenza del foro contrassegnato con "S". Dopo questa operazione NON muovere lo stick reattivo per 2 minuti.

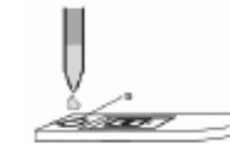

- 8) Il risultato può essere letto dopo 5 minuti che controllerete con l'orologio.

Interpretazioni dei risultati


Il test è **POSITIVO** quando nel campo T (primo campo a sinistra guardando lo stick reattivo) appare una linea rossa o di colore rosso pallido e nel campo C (secondo campo a destra guardando lo stick reattivo) appare una seconda linea di colore rosso intenso o rosa.



Il test è **NEGATIVO** se nel campo C appare una linea rossa e nel campo T non appare alcuna linea



per informazioni e assistenza clienti chiamare il 030 2410088 o visitare il sito internet www.fattiiltest.it

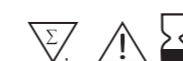

Distribuito da:



chimica omnia

Via Rose di Sopra 18/e - 25126 Brescia, Italy
ph +39 0302410088 fax +39 030322065
www.fattiiltest.it