

FATTI IL TEST!

FACILE - IMMEDIATO- LO FAI TU.

ETILOMETRO

Mini Etilometro misura il tasso alcolimetrico presente nel vostro alito e di conseguenza il possibile grado di ubriachezza.

ISTRUZIONI

1. Inserire 2 batterie alcaline AAA da 1,5V nello scompartimento batterie.
2. Sciacquare la bocca con ACQUA prima dell'utilizzo.
Non fumare o assumere alcol per almeno 15 minuti,.
3. Premere il pulsante START per 0,5 secondi al fine di accendere l'etilometro, il pre-riscaldamento del sensore sarà attivato per circa 14 secondi mentre il display mostrerà il conto alla rovescia del tempo rimanente.
4. La scritta "BLOW" lampeggia accompagnata da un segnale acustico, ciò indica che il conto alla rovescia è terminato.
5. Schiacciare e tenere premuto il pulsante START e soffiare per circa 6 secondi. La scritta "BLOW" si illumina.

Mantenere l'etilometro a circa 1,5 cm dalla bocca mentre si soffia. Smettere di soffiare quando si sente un singolo segnale acustico; a questo punto la misurazione viene visualizzata sul display.

6. Quando l'indicatore di batterie scariche si accende, la misurazione risulta imprecisa. Si prega di sostituire immediatamente le batterie.

Nota: per garantire misurazioni accurate, l'utente dovrebbe effettuare l'autopulizia nel caso di utilizzo superiore alle 2 settimane (specialmente per il primo uso). L'utente dovrebbe avviare questa procedura rimuovendo le batterie e accedendo nuovamente al dispositivo. L'autopulizia della durata di 2 minuti inizia e il display mostra il conto alla rovescia da 15 a 0, poi l'apparecchio si spegne automaticamente. Prima di eseguire il test, assicurarsi che non sia presente alcun residuo d'alcol quando si soffia aria fresca nella bocchetta.

Per informazioni e assistenza clienti chiamare il 030 2410088 o visitare il sito internet www.fattiltest.it



Distribuito da:



chimica omnia

Via Rose di Sopra 18/e - 25126 Brescia, Italy
ph +39 0302410088 fax +39 030322065
www.fattiltest.it