

FATTI IL TEST!

FACILE - IMMEDIATO- LO FAI TU.

Test di autodiagnosi per uso personale
Codice prodotto: FLH

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso

INDICAZIONI PER L'USO

Fatti il test - fertilità è un test rapido per la rilevazione qualitativa dell'ormone luteinizzante (LH) nelle urine, come supporto per il riconoscimento dell'ovulazione. Fatti il test fertilità riconosce la presenza di LH per valori uguali o superiori a 20 mIU/ml. ed è indicato per un utilizzo non professionale da parte della paziente.


PRECAUZIONI

- Seguire attentamente le istruzioni per assicurare risultati accurati.
- Solo per uso diagnostico in vitro. Non usare internamente.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non aprire la busta contenente il test finché non si è pronti ad eseguirlo. Il test deve rimanere nella busta sigillata fino al momento dell'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare in un posto asciutto ad una temperatura di 4 – 30°C. Portare a temperatura ambiente il test nella sua confezione prima di aprirla.
- Non congelare.
- Lavare bene la mani prima di eseguire il test.
- Eliminare il kit usato con i normali rifiuti urbani.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- N. 5 dispositivi test monouso per rilevare qualitativamente la presenza di LH nelle urine. Un test contiene: 1,5 µg di monoclonale anti-LH (2), adeso alla zona test della membrana, 1 µg di IgG capra anti topo sulla zona della banda di controllo della membrana e particelle di oro colloidale ricoperte con anticorpo monoclonale anti-LH (1).
- Istruzioni per l'uso.

PROCEDURA DEL TEST

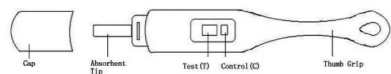

- Il test, se precedentemente conservato in frigorifero, deve essere portato a temperatura ambiente (10-30) prima del suo utilizzo. Non aprire la confezione sigillata del test finché non si è pronti ad utilizzarlo.
- Estrarre il test dalla confezione sigillata poco prima di utilizzarlo e gettare il pacchetto con il desiccante.
- Togliere il cappuccio di protezione, esponendo così all'esterno la porzione assorbente del test
- Dirigere la parte assorbente del test direttamente a contatto con il flusso di urina, come indicato nella illustrazione a fianco, tenendolo saldamente in mano, e mantenerlo in questa posizione per almeno 15 secondi finché sia stato completamente imbevuto di urina.
- Nota: fare attenzione che l'urina non entri nelle finestre Test e Controllo.
- Metodo alternativo: urinare in un contenitore asciutto e pulito, quindi immergere la parte assorbente del test direttamente nelle urine per almeno 15 secondi.
- Dopo aver tolto il test dalle urine rimettere immediatamente il cappuccio di protezione sopra la parte assorbente.
- Porre quindi in posizione orizzontale su una superficie piana il test, con le finestre Test e Controllo a faccia in su, ed aspettare 5 minuti. Non appena il test inizia a funzionare, si potrà notare un lento movimento di una sostanza di color rosa attraverso le finestre Test e Controllo. Il risultato del test deve essere letto entro 5 minuti. Non leggere il risultato dopo 10 minuti.



Per stabilire con maggior accuratezza il periodo di ovulazione si consiglia di raccogliere le urine ogni giorno alla stessa ora durante un ciclo mestruale, in quanto essendoci delle differenze tra il livello base e di il picco, il test eseguito sulle urine del 7° giorno dal ciclo mestruale è quello da prendere come riferimento.

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE

D: Che cos'è LH?

R: LH è l'ormone luteinizzante, prodotto dalla ghiandola pituitaria. Esso è sempre prodotto dall'organismo in piccole quantità; in prossimità dell'ovulazione la sua concentrazione aumenta notevolmente. Il test rapido Fatti il test Fertilità è in grado di individuare la sua presenza in concentrazioni compatibili con l'ovulazione.

D: Qual è l'uso suggerito per questo test?

R: Fatti il test Fertilità è stato progettato per rilevare la presenza di LH nelle urine. Questo può essere di aiuto nell'individuare il momento in cui il livello di LH aumenta intorno alla metà del periodo mestruale. LH raggiunge il suo picco tra le 24 e 36 ore prima dell'ovulazione.

<p>positive</p> <p>Test (T) Control (C)</p>	<p>Positivo L'intensità di colore della linea test (T) è la stessa o superiore a quella della linea di controllo (C). Il risultato positivo indica una concentrazione di LH nel campione di urine corrispondente al picco di secrezione della fase ovulatoria</p>
<p>negative</p> <p>Test (T) Control (C)</p>	<p>Negativo La linea rossa appare nella finestra del controllo (C) mentre la linea nella finestra test (T) è assente o di intensità inferiore a quella del controllo. In entrambi i casi significa che la concentrazione di LH è a livello basale (fase preovulatoria o postovulatoria).</p>
<p>invalid</p> <p>Test (T) Control (C)</p> <p>invalid</p> <p>Test (T) Control (C)</p>	<p>Risultato non valido Il risultato del test non è valido se la linea del controllo non appare entro 5 minuti dall'esecuzione del test. Le cause possono essere: la procedura di esecuzione non è stata eseguita correttamente, oppure il test non ha funzionato in modo appropriato. Verificate quindi di aver eseguito correttamente la procedura e ripetere con un nuovo test</p>

da sindrome policistica ovarica.

D: Cosa dovrei fare se il risultato è positivo?

R: Se il risultato è positivo significa che la concentrazione dell'ormone nelle urine è vicino al picco di ovulazione. Significa quindi che l'ovulazione avverrà probabilmente entro le prossime 24-36 ore.

D: Cosa dovrei fare se il risultato è negativo?

R: Se il risultato è negativo, significa che la concentrazione di LH è ancora entro i livelli normali. Potete ripetere l'esame anche i giorni successivi con nuovi test.

Per informazioni e assistenza clienti chiamare il 030 2410088 o visitare il sito internet www.fattiiltest.it



Distribuito da:



chimica omnia

Via Rose di Sopra 18/e - 25126 Brescia, Italy
 ph +39 0302410088 fax +39 030322065
www.fattiiltest.it