

FATTI IL TEST!

FACILE - IMMEDIATO- LO FAI TU.

Gravidanza

Test di autodiagnosi per uso personale
Codice prodotto: FHCG

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso

INDICAZIONI PER L'USO

Il test rapido di Fatti il test - gravidanza è indicato per la rilevazione rapida dell'ormone gonadotropina corionica umana (hCG) in campioni di urine. Questo test produce un risultato qualitativo visibile ed è indicato per un utilizzo non professionale da parte della paziente.

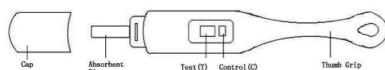
PRECAUZIONI

- Seguire attentamente le istruzioni per assicurare risultati accurati.
- Solo per uso diagnostico in vitro. Non usare internamente.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non aprire la busta contenente il test finché non si è pronti ad eseguirlo. Il test deve rimanere nella busta sigillata fino al momento dell'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare in un posto asciutto ad una temperatura di 4 - 30°C. Portare a temperatura ambiente il test nella sua confezione prima di aprirla.
- Non congelare.
- Lavare bene la mani prima di eseguire il test.
- Eliminare il kit usato con i normali rifiuti urbani.
- Nel caso di daltonismo, farsi aiutare per la lettura del risultato.

MATERIALE FORNITO

- N. 2 dispositivi test monouso per rilevare qualitativamente la presenza di hCG nelle urine. Un test contiene: 1-2 µg di monoclonali anti-hCG adeso alla zona test della membrana, 1-2 µg di IgG capra anti topo sulla zona della banda di controllo della membrana e particelle di oro colloidale ricoperte con anticorpo monoclonale anti-hCG
- Istruzioni per l'uso.

PROCEDURA DEL TEST



- Il test, se precedentemente conservato in frigorifero, deve essere portato a temperatura ambiente (10-30) prima del suo utilizzo. Non aprire la confezione sigillata del test finché non si è pronti ad utilizzarlo.
- Estrarre il test dalla confezione sigillata poco prima di utilizzarlo e gettare il pacchetto con il dessiccante.
- Togliere il cappuccio di protezione, esponendo così all'esterno la porzione assorbente del test
- Dirigere la parte assorbente del test direttamente a contatto con il flusso di urina, come indicato nella illustrazione a fianco, tenendolo saldamente in mano, e mantenerlo in questa posizione per almeno 15 secondi finché sia stato completamente imbevuto di urine.
- Nota: fare attenzione che l'urina non entri nelle finestre Test e Controllo.
- Metodo alternativo: urinare in un contenitore asciutto e pulito, quindi immergere la parte assorbente del test direttamente nelle urine per almeno 15 secondi.
- Dopo aver tolto il test dalle urine rimettere immediatamente il cappuccio di protezione sopra la parte assorbente.
- Porre quindi in posizione orizzontale su una superficie piana il test, con le finestre Test e Controllo a faccia in su, ed aspettare 5 minuti. Non appena il test inizia a funzionare, si potrà notare un lento movimento di una sostanza di color rosa attraverso le finestre Test e Controllo. Il risultato del test deve essere letto entro 5 minuti. Non leggere il risultato dopo 10 minuti.

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE

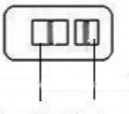
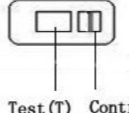
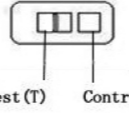
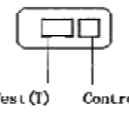
D: Cos'è l'hCG?
R: L'hCG è la Gonadotropina Corionica Umana, un ormone prodotto dalla placenta durante la gravidanza. Fatti il test Gravidanza è preparato per rilevarne la presenza.

D: Come funziona Fatti il test Gravidanza?
R: Fatti il test Gravidanza è preparato per rilevare l'hCG, un ormone prodotto dalla placenta subito dopo che l'embrione comincia ad impiantarsi nell'utero. Questo ormone si ritrova nelle urine della donna gravida.

D: Qual'è il tempo minimo per l'esecuzione del test dopo il sospetto di gravidanza?
R: Il test si può eseguire fin dal primo giorno delle mancate mestruazioni. Si può eseguire il test in qualunque momento della giornata anche se si consiglia di eseguirlo

FATTI IL TEST!

FACILE - IMMEDIATO- LO FAI TU.

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO	
<p>positive</p>  <p>Test (T) Control (C)</p>	<p>Positivo Le due linee rosa sono visibili nella finestra del test (T) e del controllo (C). Anche se l'intensità della linea del test è inferiore a quella del controllo, il risultato è da considerarsi positivo.</p>
<p>negative</p>  <p>Test (T) Control (C)</p>	<p>Negativo La linea rossa appare nella finestra del controllo mentre non è visibile la linea rossa nella finestra del test</p>
<p>invalid</p>  <p>Test (T) Control (C)</p> <p>invalid</p>  <p>Test (T) Control (C)</p>	<p>Risultato non valido Il risultato del test non è valido se la linea del controllo non appare entro 5 minuti dall'esecuzione del test. Le cause possono essere: la procedura di esecuzione non è stata eseguita correttamente, oppure il test non ha funzionato in modo appropriato. Verificate quindi di aver eseguito correttamente la procedura e ripetere con un nuovo test</p>

sulle prime urine del mattino che contengono una quantità maggiore di ormone.

D: Che importanza ha il livello di unità di hCG del test?
R: Il test di gravidanza che rileva il minor numero di unità di hCG dà i risultati più precoci. Fatti il test Gravidanza è in grado di rilevare 20mIU/ml di hCG in un campione di urine.

D: Cosa significa se le linee nelle finestre dei risultati sono di diverse intensità di rosa?
R: Quando appaiono due linee parallele, una in ciascuna finestra, il risultato è positivo, anche se sono di diversa intensità di rosa.

D: Qual'è la accuratezza del test?
R: Il test rapido Fatti il test Gravidanza ha dimostrato sia nei test di laboratorio che nelle prove cliniche una accuratezza del risultato superiore al 99%.

D: Quali fattori possono interferire con i risultati?
R: Farmaci che contengono hCG possono dare risultati falsamente positivi. Diverse condizioni di salute, oltre alla gravidanza, possono dare elevati livelli di hCG, come cisti ovariche o gravidanza ectopiche (gravidanza esterne all'utero).

D: Può esserci una gravidanza senza risultato positivo del test?
R: Normalmente il test diventa positivo entro pochi giorni dalle mancate mestruazioni. Se ciò non accade e se si sospetta una gravidanza, rivolgersi al proprio medico per l'esecuzione di un test hCG quantitativo indipendentemente dal risultato del test di autodiagnosi. Risultati falsamente negativi (test negativo in caso di gravidanza) possono aversi con urine molto diluite o nei primissimi giorni di gravidanza. In questi casi, se il sospetto di gravidanza persiste, ripetere il test dopo 48-72 ore con urine del primo mattino.

D: Cosa occorre fare se il risultato è positivo?
R: Il test positivo significa che le urine contengono hCG e vi è elevata probabilità di una gravidanza. Rivolgersi al proprio medico per la conferma e per i suggerimenti del caso.

D: Cosa occorre fare se il risultato è negativo?
R: Il test negativo significa che non è stata rilevata hCG nelle urine e che probabilmente non vi è gravidanza. Se le mestruazioni non iniziano entro una settimana dalla data attesa, ripetere la prova con un nuovo test. Se il risultato continua ad essere negativo rivolgersi al proprio medico.

Consigli per una gravidanza più tranquilla:

- Usare il test HCG per diagnosticare lo stato di gravidanza dopo un periodo di ritardo;
- Se si è ottenuto un risultato positivo è consigliabile una visita dal proprio medico per iniziare una corretta preparazione;
- Eseguire una dieta bilanciata, smettere di fumare e ridurre l'assunzione di alcol.

Reference: Domande e risposte sono basate su Guidance for Over-the-Counter (OTC) Human Chorionic Gonadotropin (hCG) 510(k)s.

Per informazioni e assistenza clienti chiamare il 030 2410088 o visitare il sito internet www.fattiltest.it



Distribuito da:



chimica omnia

Via Rose di Sopra 18/e - 25126 Brescia, Italia
ph +39 0302410088 fax +39 030322065
www.fattiltest.it